

Catálogo de Lentes de Contacto

2021



CooperVision®
Live Brightly.



CooperVision®
Live Brightly.

Índice

Lentes de contacto diarias

Hidrogel de Silicona

MyDay®
MyDay® Toric
MyDay® Multifocal
clariti® 1 day
clariti® 1 day Toric
clariti® 1 day Multifocal

Hidrogel

Proclear® 1 day
Proclear® 1 day Multifocal
My Vision™
Biomedics® 1 day Extra
Biomedics® 1 day Extra Toric

Lente de contacto control de miopía

MiSight® 1Day

Lentes de contacto mensuales

Hidrogel de Silicona

Biofinity Energys®
Biofinity®
Biofinity® XR
Biofinity® Toric
Biofinity® XR Toric
Biofinity® Multifocal
Biofinity® Toric Multifocal **NEW**
My Vision™ Max +
My Vision™ Max + Toric
Clariti® Toric XR
Clariti® Multifocal

Hidrogel

Proclear®
Proclear® Toric
Proclear® Toric XR
Proclear® Multifocal
Proclear® Multifocal XR
Proclear® Multifocal toric
Biomedics® 55 Evolution

Soluciones de mantenimiento

Hy-Care™ multipurpose solution
Comfort Drops™

Cómo crecer en lentes de contacto


Herramientas de captación
Herramientas en el punto de venta
Herramientas de desarrollo
Herramientas de fidelización
Sistema de pedidos online



Simbología




Calidad del producto

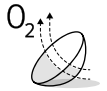

Alta transmisión
de oxígeno



Comodidad durante todas
las horas de porte

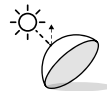

Protección UV



Lente recomendada para
un alto uso de dispositivos
digitales




Posibilidad de Marca
Privada



CooperVision®

MyDay®

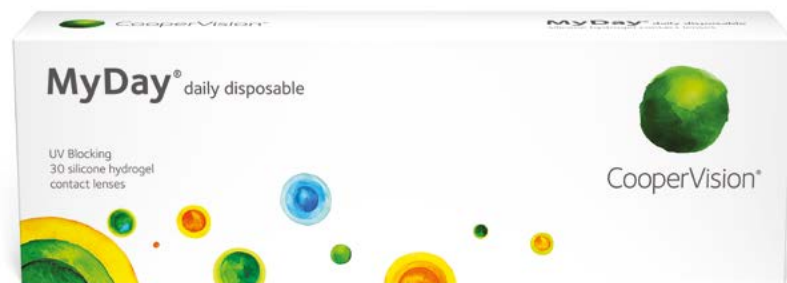

Categorización



Características


- Lente de hidrogel de silicona fabricada con la tecnología Aquaform®.
- Alta oxigenación.
- Alto contenido en agua.
- Desechable diaria.
- Filtro protección radiación UV*.

Beneficios

- Proporciona oxigenación al ojo de forma más eficiente que otros materiales de silicona.
- Su módulo permite tener una lente cómoda y de buena manipulación.
- Todo ello permite a MyDay® estar optimizada en sus propiedades sin compromiso en ninguna de ellas: Salud, Comodidad y Manipulación.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.

MyDay®

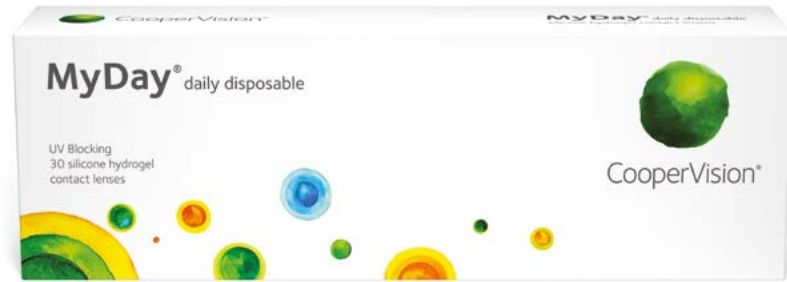

Categorización





Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Pack de 90 lentes
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes
Material	Stenfilcon A
Hidratación	54%
Dk/t (Corrección borde)	100
Espesor centro	0.08 mm Para -3.00 D
Radio	8.40 mm
Diámetro	14.20 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Módulo de Elasticidad	0.4 MPa
Filtro UV	Sí
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

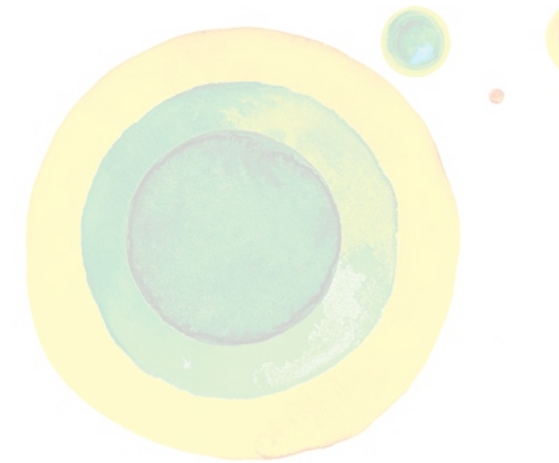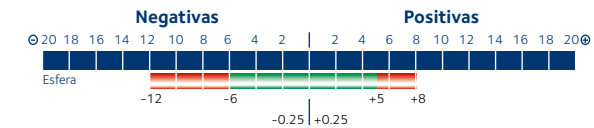

MyDay® Toric



Categorización



Características

- Material de Hidrogel de Silicona fabricado con la tecnología Aquaform®.
- Alta oxigenación.
- Alto contenido en agua.
- Desechable diaria.
- Filtro protección radiación UV*.
- Para astigmatismo.

Beneficios

- La misma geometría tórica que Biofinity® Toric
- Proporciona oxigenación al ojo de forma más eficiente que otros materiales de silicona.
- Su módulo permite tener una lente cómoda y con una buena manipulación.
- Todo ello permite a MyDay® toric estar optimizada en sus propiedades sin compromiso en ninguna de ellas: Salud, Comodidad y Manipulación.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.



MyDay® Toric



Categorización



*Combinaciones de parámetros



Rango de potencia (esfera)	Cilindros	Ejes
Neutro a -6.00D (pasos de 0.25D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60° , 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150° , 160°, 170°, 180°
Neutro a -6.00D (pasos de 0.25D) -6.50D a -10.00D (pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (pasos de 0.50D)	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
-6.50D a -10.00D (pasos de 0.50D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
+0.25D a +6.00D (pasos de 0.25D)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

Los datos en **NEGRITA** indican los nuevos ejes y esferas añadidos

Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Formato de 90 lentes
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes
Material	Stenfilcon A
Hidratación	54%
Dk/t (Corrección borde)	80
Cilindros	-0.75, -1.25, -1.75 y -2.25*
Ejes	De 10° a 180°*
Espesor centro	0.10 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.50 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Módulo de Elasticidad	0.4 MPa
Filtro UV	Sí
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

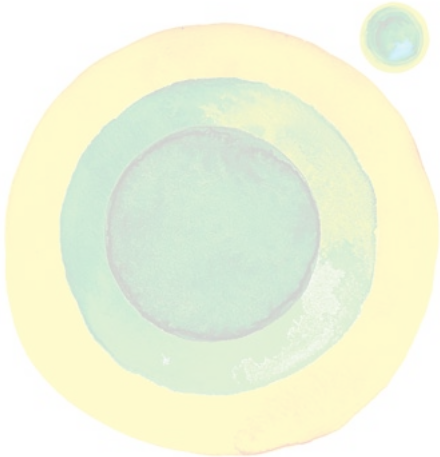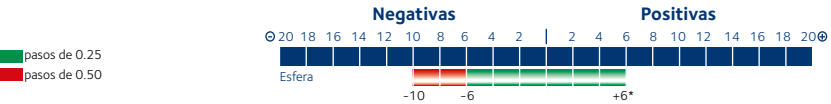




MyDay® Multifocal



Calculadora de Multifocales
Calcule las lentes de prueba en la web
www.CooperVision.es/OptiExpert
o con la App OptiExpert™

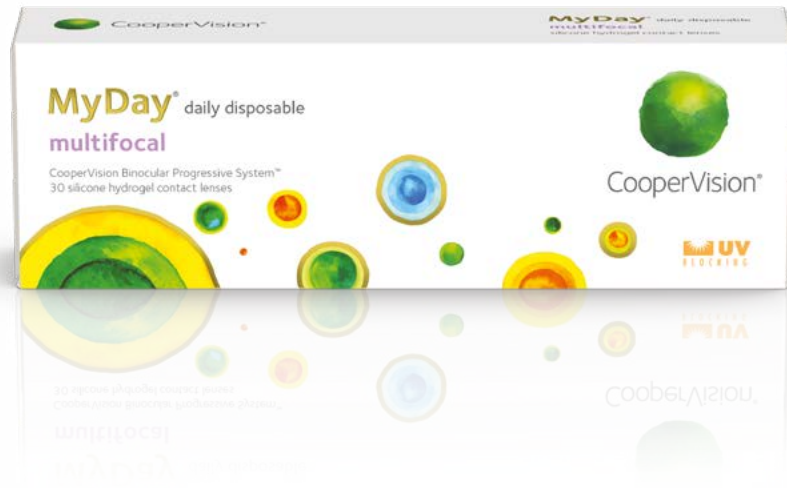

Categorización




Características

- Sistema Binocular Progressive System™
- Diferentes diseños progresivos para todos los niveles de presbicia
- Alto rendimiento visual en todas las distancias
- Material Premium con un alto Dk/t y una excelente humectabilidad

Diseño


Adición LOW

Diseño esférico con visión central de cerca

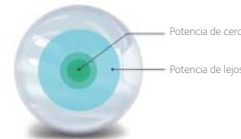


Adición MED

Diseño esférico con visión central de cerca

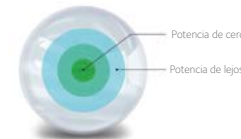

Adición HIGH

Diseño esférico con visión central de cerca y zonas intermedias dobles

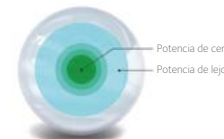


1. Datos en archivos de CVI 2020. Estudio de dispensación prospectivo, con doble enmascaramiento, bilateral, de una semana de duración con MyDay® multifocal; n = 104 usuarios habituales de lentes de contacto multifocales.

GUÍA DE ADAPTACIÓN

Adición en gafa	Ojo dominante	Ojo no dominante
+0.75D a +1.25D	LOW	LOW
+1.50D a +1.75D	LOW	MED
+2.00D a +2.50D	LOW	HIGH



MyDay® Multifocal

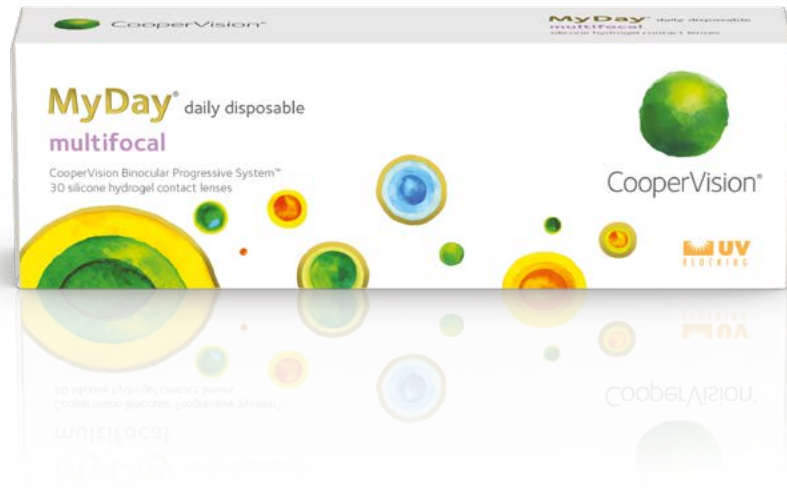

Categorización





7 de cada 10
graduaciones de
presbicia pueden ser
tratadas con
MyDay® multifocal

Descripción Técnica

Compensación	Presbicia
Diseño	Diseño Asférico - Centro Cerca
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Formato de 90 lentes
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes
Material	Stenfilcon A
Hidratación	54%
Dk/t (Corrección borde)	100 x 10 ⁻⁹
Radio	8.40 mm
Diámetro	14.20 mm
Adiciones	LOW (de +0.75 a +1.25D adición en gafa) MED (de +1.50 a +1.75D adición en gafa) HIGH (de +2.00 a +2.50D adición en gafa)
Filtro UV	Sí
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

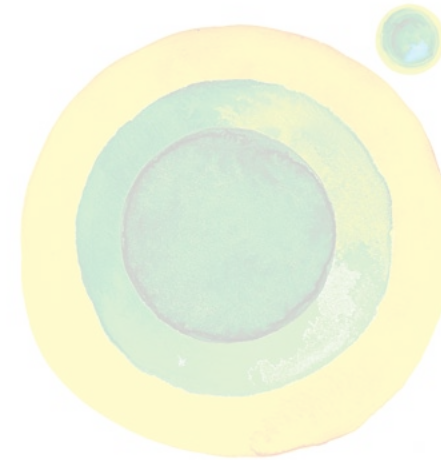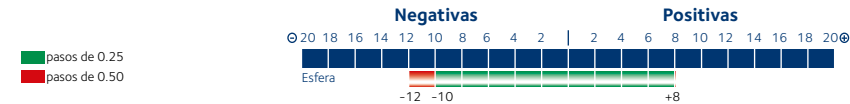

Clariti® 1 Day



Categorización



Características

- Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología WetLoc™
- Desechable diaria.
- Alta oxigenación.
- Alta hidratación.
- Filtro UV*.

Beneficios

- Ideal para los usuarios que actualmente utilizan lentes desechables diarias de hidrogel.
- Lente cómoda y con buena manipulación.
- Buena salud ocular debido a su alta transmisión de oxígeno.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.

Otros profesionales también se interesaron por:

MyDay



Clariti® 1 Day



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Pack de 90 lentes
Presentación de muestras	Pack de 5 lentes
Material	Somofilcon A
Hidratación	56%
Dk/t (Corrección borde)	86
Espesor de centro	0.07 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.10 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Módulo de Elasticidad	0.5 MPa
Filtro UV	Sí

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

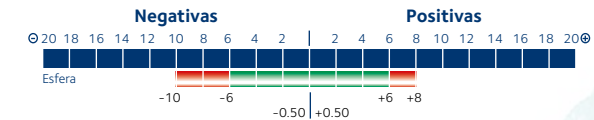

Clariti® 1 Day toric



Otros profesionales también se interesaron por:

MyDay Toric



Categorización



Características

- Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología WetLoc™
- Desechable diaria.
- Corrección para astigmatismo.
- Alta oxigenación.
- Alta hidratación.
- Filtro UV*.

Beneficios

- Ideal para los usuarios que actualmente utilizan lentes desechables diarias tóricas de hidrogel.
- Lente cómoda y con buena manipulación.
- Buena salud ocular debido a su alta transmisión de oxígeno.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.



Clariti® 1 Day toric



*Combinaciones de parámetros

Esferas	Cilindros	Ejes
Neutro a -6.00D (pasos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 30°, 40°, 50° , 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150° , 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, 70°, 80° , 90°, 100°, 110° , 160°, 170°, 180°
-6.50 a -9.00D (pasos de 0.50)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0.25 a +4.00D (pasos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10° , 20°, 70°, 80° , 90°, 100° , 110°, 160°, 170° , 180°

Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Formato de 90 lentes
Presentación de muestras	Pack de 5 lentes
Material	Somofilcon A
Hidratación	56%
Dk/t	57
Cilindros	-0.75, -1.25, -1.75 y -2.25*
Ejes	De 10° a 180°*
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.30 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Filtro UV	Sí

Potencias

pasos de 0.25
pasos de 0.50





Clariti® 1 Day multifocal



Categorización



Características

- Material de Hidrogel de Silicona creado con la tecnología WetLoc™
- Desechable diaria con alta oxigenación, alta hidratación y filtro UV* para sus pacientes presbítas.
- Geometría multifocal para una excelente visión de lejos, cerca e intermedia.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Seleccione la potencia de lejos del subjetivo realizado y aplique distometría y equivalente esférico si fuera necesario (EE).

Partiendo del EE obtenido, calcule las lentes de prueba según el siguiente cuadro:

	Dominancia Ocular	Adición de +0.75 a +1.75	Adición de +2.00 a +2.25	Adición de +2.50 y superiores
Hipermétropes	Ojo dominante Ojo no dominante	EE LOW EE +0,25D LOW	EE +0,25D LOW EE +0,50D LOW	EE +0,25D LOW EE +0,25D HIGH
Miopes Emétropes	Ojo dominante Ojo no dominante	EE LOW EE LOW	EE LOW EE +0,50D LOW	EE +0,25D LOW EE +0,25D HIGH

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivos de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.



Calculadora de Multifocales

Calcule las lentes de prueba en la web
www.CooperVision.es/OptiExpert
o con la App OptiExpert™

Otros profesionales también se interesaron por:

MyDay Multifocal





Clariti® 1 Day multifocal



Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia
Diseño	Asférico - Centro Cerca
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Formato de 90 lentes
Presentación de muestras	Pack de 5 lentes
Material	Somofilcon A
Hidratación	56%
Dk/t (Corrección borde)	86
Espesor de centro	0.07 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.10 mm
Adiciones	Low (para adiciones hasta +2.25) High (para adiciones de +2.50 a +3.00)
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Filtro UV	Sí

Potencias

pasos de 0.25



Proclear® 1 Day



Categorización



Características

- Material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación.
- Lente de hidrogel de alta hidratación para una gran comodidad.
- Diseño esférico avanzado que proporciona excelente visión neutralizando la aberración esférica inherente a la lente de contacto y al ojo.

Beneficios

- Para pacientes que quieran prescindir de las soluciones de mantenimiento.
- Buena manipulación y comodidad a lo largo del día.

Otros profesionales también se interesaron por:

MyDay



Clariti 1 Day



Proclear® 1 Day



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica	
Diseño	Asférico	
Reemplazo	Diario	
Uso	Diario	
Producción	Moldeada	
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Pack de 90 lentes	
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes	
Material	Omafilcon A	
Hidratación	60%	
Dk/t (Corrección borde)	28	
Espesor centro	0.09 mm	Para -3.00 D
Radio	8.70 mm	
Diámetro	14.20 mm	
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso	
Tinte de manipulación	Azul	

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

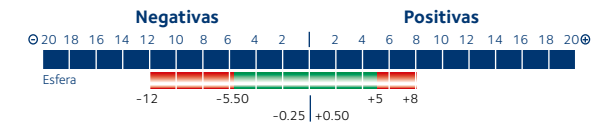

Proclear® 1 Day multifocal



Otros profesionales también se interesaron por:

Clariti 1 Day Multifocal



Categorización



Características

- Material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación.
- Lente desechable diaria para pacientes presbitas.
- Diseño multifocal avanzado que proporciona excelente visión para lejos, cerca e intermedia.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Seleccione la potencia de lejos del subjetivo realizado y aplique distometría y equivalente esférico si fuera necesario (EE).

Partiendo del EE obtenido, calcule las lentes de prueba según el siguiente cuadro:

Adición en gafa	Potencia a añadir en el Ojo Dominante	Potencia a añadir en el Ojo No Dominante
Hasta +1.00	+0.50	+0.50
+1.25 a +2.50	+0.50	+1.25

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual.



Calculadora de Multifocales
Calcule las lentes de prueba en la web
www.CooperVision.es/OptiExpert
o con la App OptiExpert™





Proclear® 1 Day multifocal



Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia	
Diseño	Asférico - Centro Cerca	
Reemplazo	Diario	
Uso	Diario	
Producción	Moldeada	
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes	
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes	
Material	Omafilcon A	
Hidratación	60%	
Dk/t (Corrección borde)	28	
Espesor centro	0.09 mm	Para -3.00 D
Radio	8.70 mm	
Diámetro	14.20 mm	
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso	
Tinte de manipulación	Azul	

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50



My.Vision®

Desechable Diaria para niños y adolescentes



Categorización



Características

- Lente Diaria para niños y adolescentes.
- Seguridad: En actividades deportivas, por ejemplo jugar al fútbol, puede ser peligroso hacerlo con gafas no apropiadas.
- Autoconfianza: Los niños y adolescentes en ocasiones pueden sufrir complejos y discriminación por el uso de gafas.

Beneficios

- Ayuda a reducir los miedos que padres y niños pueden plantearse en el uso de lentes de contacto.
- Salud ocular: Reemplazo diario, buen paso de oxígeno y alta hidratación con un bajo coeficiente de deshidratación.

Otros profesionales también se interesaron por:

Clariti 1 Day



MiSight 1 Day



CooperVision®



My.Vision®



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Pack de 90 lentes
Presentación de Muestras	Pack de 5 lentes
Material	Omafilcon A
Hidratación	60%
Dk/t (Corrección borde)	28
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.20 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

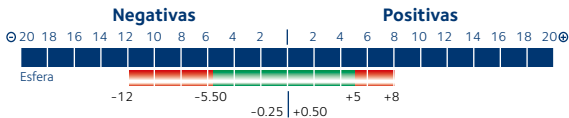

CooperVision®

Biomedics® 1 Day Extra



Categorización



Características

- Lente diaria de hidrogel.
- Varios radios de curvatura para un amplio rango de queratometrías.

Beneficios


- Para usuarios esporádicos de lentes de contacto.
- Ideal para pacientes con intolerancia a las soluciones de mantenimiento.
- Comodidad y fácil manipulación.

Otros profesionales también se interesaron por:

Clariti 1 Day



Biomedics® 1 Day Extra

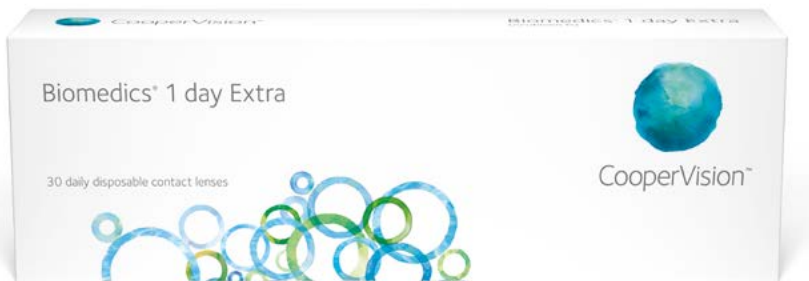

Categorización




Descripción Técnica


Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes y Pack de 90 lentes
Presentación de muestras	Pack de 5 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratación	55%
Dk/t	27
Espesor de centro	0.07 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm potencias negativas 8.80 mm potencias positivas
Diámetro	14.20 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

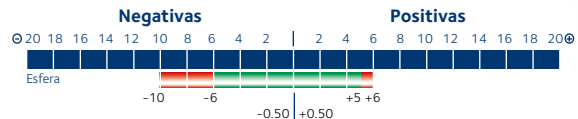

Biomedics® 1 Day Extra toric

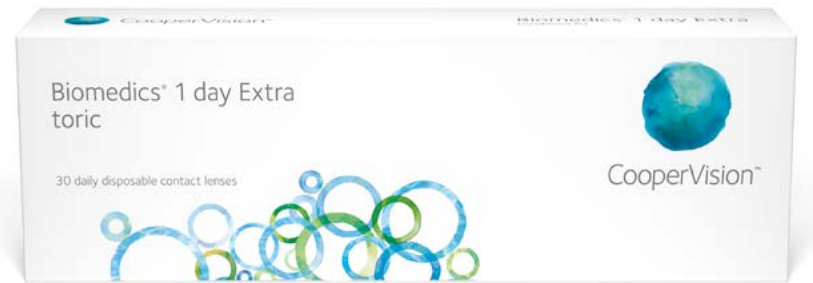

Categorización



Características

- Lente diaria de hidrogel.
- Una geometría tórica con la garantía del líder mundial en tóricas.

Beneficios


- Para usuarios esporádicos de lentes de contacto.
- Ideal para pacientes con intolerancia a las soluciones de mantenimiento.
- Comodidad y fácil manipulación.

Otros profesionales también se interesaron por:

Clariti 1 Day Toric




Biomedics® 1 Day Extra toric

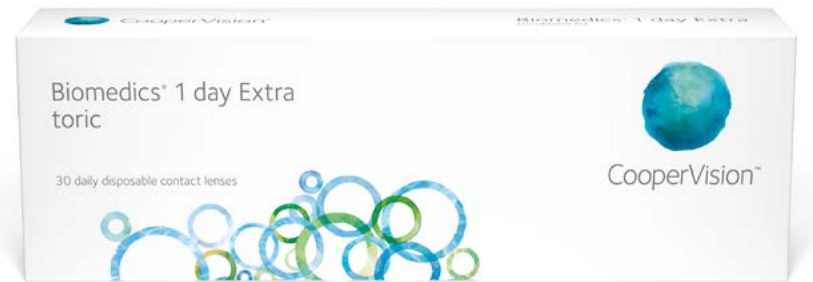

Categorización




Situación de las
Marcas Láser:

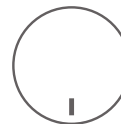

Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 lentes
Presentación de muestras	Pack de 5 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratación	55%
Dk/t	17
Cilindros	-0.75, -1.25, -1.75
Ejes	180°, 20°, 160°, 90°
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.50 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

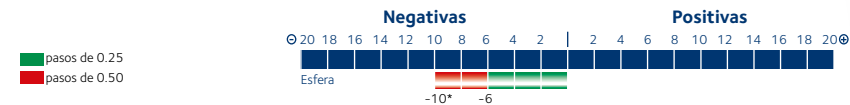

Cilindros: -0.75, -1.25 y -1.75

Ejes: 180°, 20°, 160° y 90°

*Esferas desde -7.50 hasta -10.00 solo disponibles para ejes de 90° y 180°

MiSight® 1 day

Desechable diaria para Control de Miopía



Categorización



Características

- Lente desechable diaria para el control de la progresión de la miopía.
- Diseñadas con ActivControl® Technology para controlar la elongación axial y la progresión de la miopía a la vez que compensan el error refractivo.
- Única lente blanda desechable diaria que dispone del marcado CE (UE) y la aprobación de la FDA (EE.UU.) para ser recomendada con el propósito de ralentizar la progresión de la miopía en niños y adolescentes.
- Adaptación sencilla, como unas lentes monofocales.
- Material biocompatible de alta resistencia a la deshidratación.

Beneficios

- Las lentes MiSight® 1 day han demostrado reducir la progresión de la miopía en un 59% de media, disminuyendo la dependencia de las gafas y el riesgo de complicaciones en la salud ocular en el futuro.^{1,2}
- Fácil de usar para niños.
- Reemplazo diario: No necesitan mantenimiento, mínimo riesgo de complicaciones.
- Ayuda a los niños a desarrollar todo su potencial.
- Visión nítida en el colegio, jugando en el exterior o viendo la televisión.²

¹ Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. *Prog Retin Eye Res.* 2012;31:622-60.
² Chamberlain P. et al. A 3-Year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control *Optom Vis Sci* 2019; Vol 96(8). July 2019.

Para poder realizar pedidos de muestras y packs de esta lente es necesario completar la formación a la que podrá acceder a través de: www.CooperVision.es/cursos



CooperVision®



MiSight® 1 day




Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	ActivControl® Technology (Dual focus)
Reemplazo	Diario
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 30 y 90 lentes
Presentación de muestra	Pack de 5 lentes
Material	Omafilcon A
Hidratación	60%
Dk/t (Corrección borde)	28
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.20 mm
Mantenimiento	No es necesario, se desecha con un uso
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

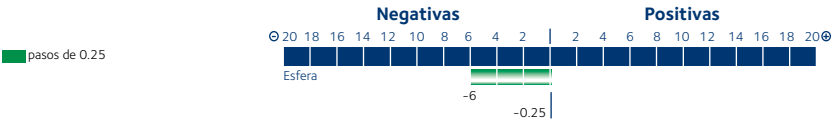

Biofinity Energys®



9 DE CADA **10***

Usuarios de dispositivos digitales se mostraron de acuerdo en que las lentes Biofinity Energys® hacían que sus ojos se sintieran bien.

*CooperVision - Datos de archivo 2015

Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible o prolongado hasta 29 noches.
- Diseñada con Digital Zone Optics™, diseño óptico que ayuda a facilitar el esfuerzo acomodativo sin perjudicar la visión de lejos.


Beneficios

- Biofinity Energys® es la única lente que combina la humectabilidad natural de la tecnología Aquaform® con el innovador diseño óptico Digital Zone Optics™.
- Los usuarios de dispositivos digitales pueden cambiar de enfoque con menos esfuerzo y más comodidad de la pantalla digital a cualquier otra tarea.
- Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
- Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación óptima a más usuarios.
- Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.

Biofinity Energys®



Categorización

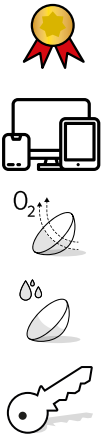

Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico con Digital Zone Optics™
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario, flexible o prolongado hasta 29 noches
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Formato de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	160
Espesor centro	0.08 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.00 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50



Biofinity®



Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible o prolongado hasta 29 noches.

Beneficios

- Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
- Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación óptima a más usuarios.
- Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Energys



Reemplazo mensual

Myday




Reemplazo diario



Biofinity®



Categorización

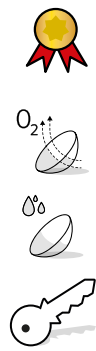


Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario, flexible o prolongado hasta 29 noches
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Pack de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	160
Espesor centro	0.08 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.00 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

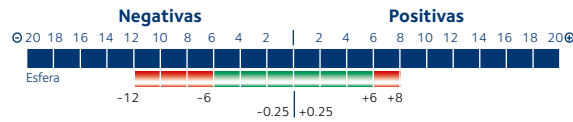

Biofinity® XR



Hasta -20
y hasta +15
en Stock

Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual esférica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible o prolongado hasta 29 noches.

Beneficios

- Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
- Diseño de la superficie posterior optimizado para proporcionar una adaptación óptima a más usuarios.
- Diseño patentado de borde redondeado que reduce la interacción conjuntival.
- Para pacientes con altas graduaciones de miopía o hipermetropía.

Biofinity® XR




Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario, flexible o prolongado hasta 29 noches
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Formato de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	160
Espesor centro	0.08 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.00 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

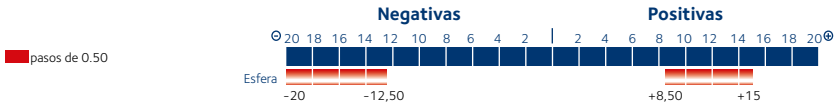

Biofinity® toric



Otros profesionales también se interesaron por:

Myday Toric



Reemplazo diario

Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual tórica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible.

Beneficios

- Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
- Perfil de espesor horizontal simétrico para una orientación y fiabilidad que proporciona una mejor agudeza visual y reduce el tiempo de adaptación.
- Área de balastro amplia y constante independiente de la potencia para una buena estabilidad.



Perfil de espesor horizontal simétrico

Orientación constante y fiable que proporciona mejor agudeza visual, facilidad y reducción de tiempo de la adaptación.



Zona de balastro amplia y constante

La zona de balastro es la misma independientemente de la potencia. La zona prismática de una lente tórica proporciona el efecto más significativo en la orientación y estabilidad general de la lente en el ojo.




Biofinity® toric



Categorización




Situación de las
Marcas Láser:

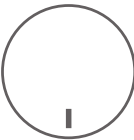

Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario y flexible
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Formato de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	116
Espesor centro	0.11 mm Para -3.00 D
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.50 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

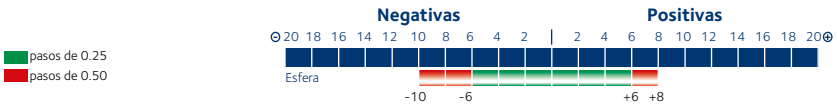

Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 y -2.25. Ejes: de 10° a 180° (pasos de 10°)



Biofinity® XR toric



Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual tórica de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible.

Beneficios

- Disponible para altos astigmatismos.
- Menor módulo para una mayor comodidad para el usuario de lentes de contacto.
- Perfil de espesor horizontal simétrico para una orientación y fiabilidad que proporciona una mejor agudeza visual y reduce el tiempo de adaptación.
- Área de balastro amplia y constante independiente de la potencia para una buena estabilidad.



Perfil de espesor horizontal simétrico


Orientación constante y fiable que proporciona mejor agudeza visual, facilidad y reducción de tiempo de la adaptación.



Zona de balastro amplia y constante

La zona de balastro es la misma independientemente de la potencia. La zona prismática de una lente tórica proporciona el efecto más significativo en la orientación y estabilidad general de la lente en el ojo.


Biofinity® XR toric

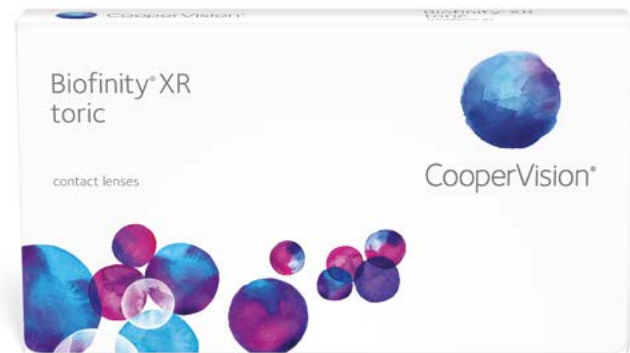

Categorización




Situación de las
Marcas Láser:

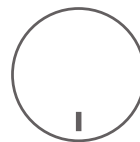

Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario y flexible
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Pack de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	116
Espesor centro	0.11 mm Para -3.00 D
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.50 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

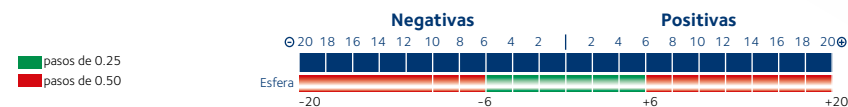


Cilindros*: De -2.75 a -5.75 en pasos de 0.50D

Ejes: De 5° a 180° en pasos de 5°

*Para esferas de +8,50 a +20,00 y de -20,00 a -10,50, disponible con cilindros de -0,75 a -5,75 en pasos de 0,50D



Biofinity® multifocal

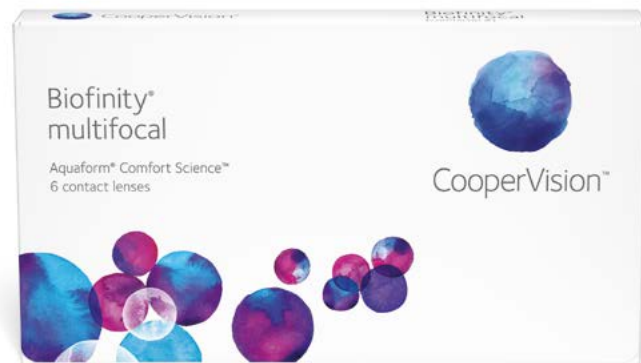

Categorización



Características

- Fabricada con el material patentado Aquaform® para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Lente mensual multifocal de gama alta con Aquaform® que permite un uso flexible o prolongado hasta 29 noches/30 días.

Guía de adaptación

Paso 1 Haga graduación (subjetivo) y verifique el ojo Dominante

Paso 2 Seleccione la potencia de lejos de la graduación realizada y aplique distometría y/o equivalente esférico si fuese necesario. Elija diseño D o N según el siguiente cuadro:

Adición	Ojo Dominate	Ojo No Dominate
+1.00	D	D
+1.50	D	D
+2.00	D	N
+2.50	D	N

Paso 3 Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de evaluar la visión binocular

Consejos de Adaptación

Seleccione el máximo positivo para la visión de lejos
Mantenga la adición lo más baja posible

Revise la agudeza visual de lejos con iluminación normal
Revise la visión de cerca del paciente preferentemente con elementos de la vida real (móvil, revista, etc...)

Otros profesionales también se interesaron por:

MyDay Multifocal



Reemplazo diario

Calculadora de Multifocales
Calcule las lentes de prueba en la web
www.CooperVision.es/OptiExpert
o con la App OptiExpert™



Biofinity® multifocal



Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario, flexible o prolongado hasta 29 noches
Producción	Moldeada
Geometría*	Asimétrica Lente D y Lente N
Potencias*	+6.00 a -10.00
Adiciones*	+1.00, +1.50, +2.00 y +2.50
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Formato de 6 Lentes
Material	Comfilcon A
Hidratación	48%
Dk/t (Corrección borde)	142
Espesor de centro	0.10 mm en diseño D 0.09 mm en diseño N
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.00 mm
Módulo de Elasticidad	0.75 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

pasos de 0.25
pasos de 0.50



*Datos necesarios
para el pedido



Biofinity® toric multifocal

NOVEDAD

Categorización



Características

- Diseñada con Aquaform® Technology para un perfecto equilibrio entre oxígeno e hidratación.
- Fabricada con Optimised Toric Lens Geometry™, las mismas características de diseño de Biofinity® toric, para una adaptación estable y con fiabilidad.
- Fabricada con Balanced Progressive® Technology, las mismas características de diseño de Biofinity® multifocal, para un rendimiento visual excepcional a todas las distancias.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Solicite la potencia de lejos del subjetivo realizado, aplicando distometría si fuera necesario.

Adición y Diseño: Seleccione la adición y diseño de las lentes según el siguiente cuadro:

Adición en gafa	Adición en LC	Ojo Dominante	Ojo No Dominante
+1.00 + 1.25	+1.00	D	D
+1.50 + 1.75	+1.50	D	D
+2.00 + 2.25	+2.00	D	N
+2.50 + 2.75	+2.50	D	N

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual



**Próximamente disponible en Calculadora de Multifocales*



Biofinity® toric multifocal



Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia con Astigmatismo	
Reemplazo	Mensual	
Uso	Diario y flexible	
Geometría*	Geometría Asimétrica Lente D / Lente N	
Esferas*	+10.00 a -10.00	
Cilindros*	de -0.75 a -5.75 en pasos de 0.50	
Ejes*	de 5° a 180° en pasos de 5°	
Adiciones*	+1.00, +1.50, +2.00 y +2.50	
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes	
Presentación de muestra	Blíster unitario	
Material	Comfilcon A	
Hidratación	48%	
Dk/t	116	
Espesor de centro	0.11 mm	Para -3.00 D
Radio	8.70 mm	
Diámetro	14.50 mm	
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)	
Tinte de manipulación	Azul	
Situación de marca láser	Una marca a las 6	
Potencias		

*Datos necesarios para el pedido

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50



My.Vision™ Max +



Categorización



Características

- Lente mensual de hidrogel de silicona para adolescentes.
- Seguridad: En actividades deportivas, por ejemplo jugar al fútbol, puede ser peligroso hacerlo con gafas no apropiadas.
- Autoconfianza: Los adolescentes en ocasiones pueden sufrir complejos y discriminación por el uso de gafas.

Beneficios

- Ayuda a reducir los miedos que padres y adolescentes pueden plantearse en el uso de lentes de contacto.
- Protección contra la radiación ultravioleta*.
- Salud ocular: Un alto paso de oxígeno ayuda a mantener los ojos blancos y sanos.**

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.

**Otros factores pueden influir en la salud ocular.

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Esférica



Reemplazo mensual

Clariti 1 Day



Reemplazo diario



CooperVision®

My.Vision™ Max +



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 6 lentes
Material	Fanfilcon A
Hidratación	55%
Dk/t (Corrección borde)	110
Radio	8.40 mm
Diámetro	14.20 mm
Módulo de Elasticidad	0.6 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

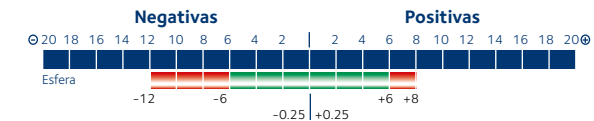

My.Vision™ Max + toric



Categorización



Características

- Lente mensual de hidrogel de silicona para pacientes adolescentes con astigmatismo.
- Seguridad: En actividades deportivas, por ejemplo jugar al fútbol, puede ser peligroso hacerlo con gafas no apropiadas.
- Autoconfianza: Los adolescentes en ocasiones pueden sufrir complejos y discriminación por el uso de gafas.

Beneficios

- Ayuda a reducir los miedos que padres y adolescentes pueden plantearse en el uso de lentes de contacto.
- Protección contra la radiación ultravioleta*.
- Salud ocular: Un alto paso de oxígeno ayuda a mantener los ojos blancos y sanos.**

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.

**Otros factores pueden influir en la salud ocular.

Otros profesionales también se interesaron por:

BiofinityToric



Reemplazo mensual

Clariti 1 Day Toric



Reemplazo diario



CooperVision®


My.Vision™ Max + toric



Categorización




Situación de las
Marcas Láser:

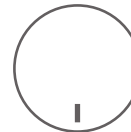


Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 6 lentes
Material	Fanfilcon A
Hidratación	55%
Dk/t (Corrección borde)	90
Radio	8.50
Diámetro	14.50 mm
Módulo de Elasticidad	0.6 MPa
Mantenimiento	Solución Única o Peróxido (no usar desinfección térmica ni tabletas enzimáticas)
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

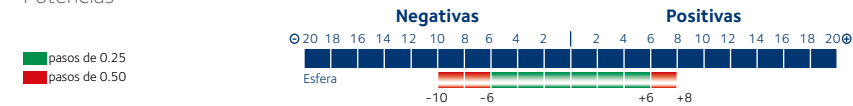

Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 y -2.25. Ejes de 10° a 180° (pasos de 10°)

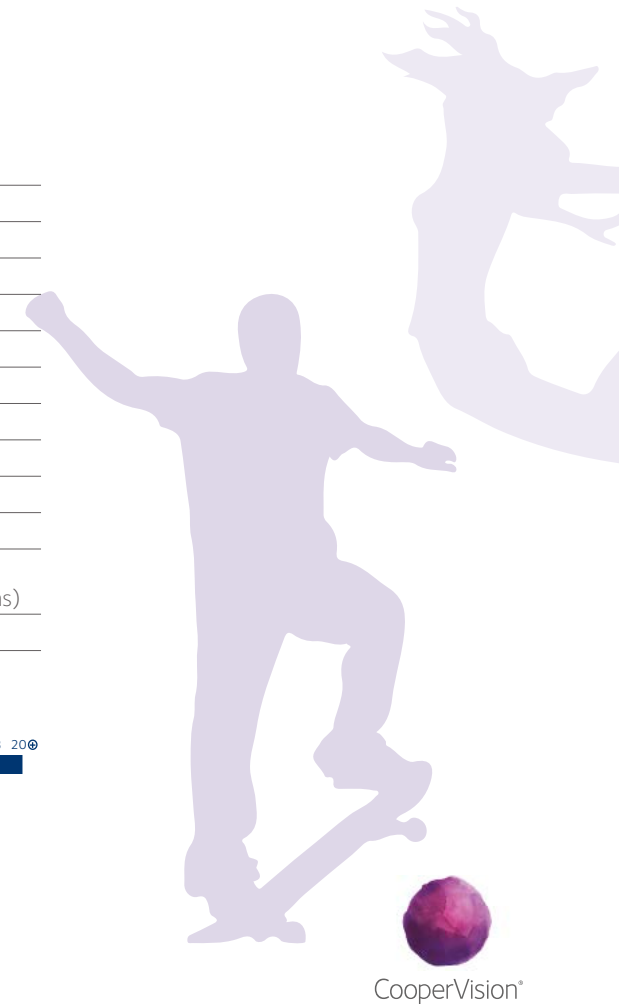

Clariti® XR Toric



DISPONIBLES
BLISTERS XR

Categorización



Características

- Lente de contacto tórica de hidrogel silicona para pacientes con astigmatismos altos.
- Fabricada con tecnología WetLoc™.
- Filtro UV.


Beneficios

- Alta transmisibilidad de oxígeno para una buena salud ocular.
- Bajo módulo de elasticidad para una comodidad mejorada.
- La tecnología patentada WetLoc™ proporciona una menor fricción durante el uso.
- Protección contra la radiación UV*.



CooperVision®

Clariti® XR Toric

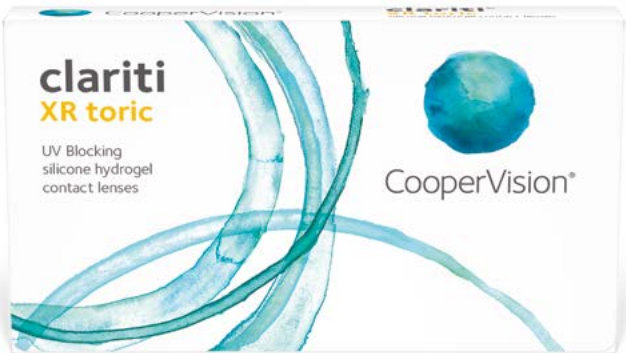

Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Pack de 6 lentes
Presentación de muestra	Blister
Material	Filcon II 3
Hidratación	56%
Dk	60
Dk/t (Corrección borde)	57
Espesor centro	0.105 Para -3.00 D
Radio	8.70 mm
Diámetro	14.40 mm
Grabado	Una marca a las 6
Mantenimiento	Solución única o Peróxido
Filtro UV	Sí

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50




Cilindros: De -0.75 a -2.25 en pasos de 0.50 disponibles para esferas de -9.50 a -10.00 y de +6.50 a +10.00.
 De -2.75 a -5.75 en pasos de 0.50 disponibles para esferas de +10.00 a -10.00.

Ejes: De 5° a 180° en pasos de 5°

* Potencias con esferas de +6.00 a -9.00 y cilindros de -0.75 a -2.25 no disponible en Clariti XR Toric.
 Para estas potencias recomendamos solicitar Biofinity Toric.



Clariti® Multifocal Mensual

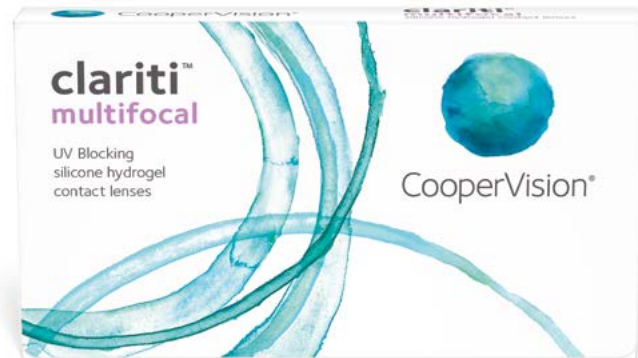

Categorización



Características

- Geometría multifocal de fácil adaptación para una excelente visión de lejos, cerca e intermedia.
- Material de Hidrogel de Silicona con la tecnología Wetloc™, con alta oxigenación, alta hidratación y filtro UV* para sus pacientes presbitas.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Seleccione la potencia de lejos del subjetivo realizado y aplique distometría y equivalente esférico si fuera necesario (EE).

Partiendo del EE obtenido, calcule las lentes de prueba según el siguiente cuadro:

	Dominancia Ocular	Adición de +0.75 a +1.75	Adición de +2.00 a +2.25	Adición de +2.50 y superiores
Hipermetropes	Ojo dominante	EE LOW	EE +0,25D LOW	EE +0,25D LOW
	Ojo no dominante	EE +0,25D LOW	EE +0,50D LOW	EE +0,25D HIGH
Miopes Emétropes	Ojo dominante	EE LOW	EE LOW	EE +0,25D LOW
	Ojo no dominante	EE LOW	EE +0,50D LOW	EE +0,25D HIGH

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual.

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son substitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.



Calculadora de Multifocales

Calcule las lentes de prueba en la web www.CooperVision.es/OptiExpert o con la App OptiExpert™

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Multifocal

Clariti 1 Day multifocal




Reemplazo mensual



Reemplazo diario



Clariti® Multifocal Mensual

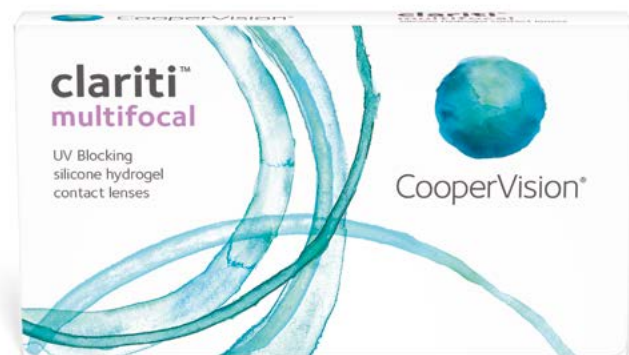

Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia	
Diseño	Asférico - Centro Cerca	
Reemplazo	Mensual	
Uso	Mensual	
Producción	Moldeada	
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y formato de 6 lentes	
Presentación de muestras	Blister de prueba	
Material	Somofilcon A	
Hidratación	56%	
Dk/t (Corrección borde)	86	
Espesor de centro	0.07 mm	Para -3.00 D
Radio	8.70 mm	
Diámetro	14.20 mm	
Adiciones	Low (para adiciones hasta +2.25) High (para adiciones de +2.50 a +3.00)	
Mantenimiento	Única / Peróxido	
Filtro UV	Sí	

Potencias

- pasos de 0.25
- pasos de 0.50



Proclear®



DISPONIBLE EN STOCK
De +20.00 a -20.00

Categorización



Características

- Material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación y a los depósitos.
- Lente de hidrogel de alta hidratación para una gran comodidad.
- **Disponible en stock de +20.00 a - 20.00**

Beneficios

- Indicado para usuarios con poca calidad o cantidad de lágrima.
- Adecuada para ambientes secos y ojos sensibles.

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Esferica



Reemplazo mensual

ProcLEAR 1 Day



Reemplazo diario



Proclear®



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Formato de 6 lentes
Material	Omafilcon B con PC
Hidratación	62%
Dk	27
Dk/t	42
Espesor de centro	0.065mm Para -3.00 D
Radio	8.60 mm
Diámetro	14.20 mm
Mantenimiento	Única / Peróxido
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

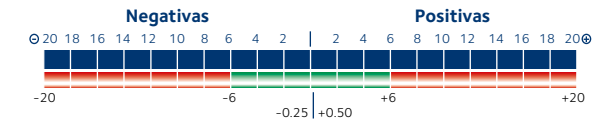

Proclear® toric

DISPONIBLES
BLISTERS XR



Categorización



Características


- Lente tórica de material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación y a los depósitos.
- Lente de hidrogel de alta hidratación para una gran comodidad.

Beneficios

- Indicado para usuarios con poca calidad o cantidad de lágrima.
- Adecuada para ambientes secos y ojos sensibles.

Otros profesionales también se interesaron por:


BiofinityToric XR

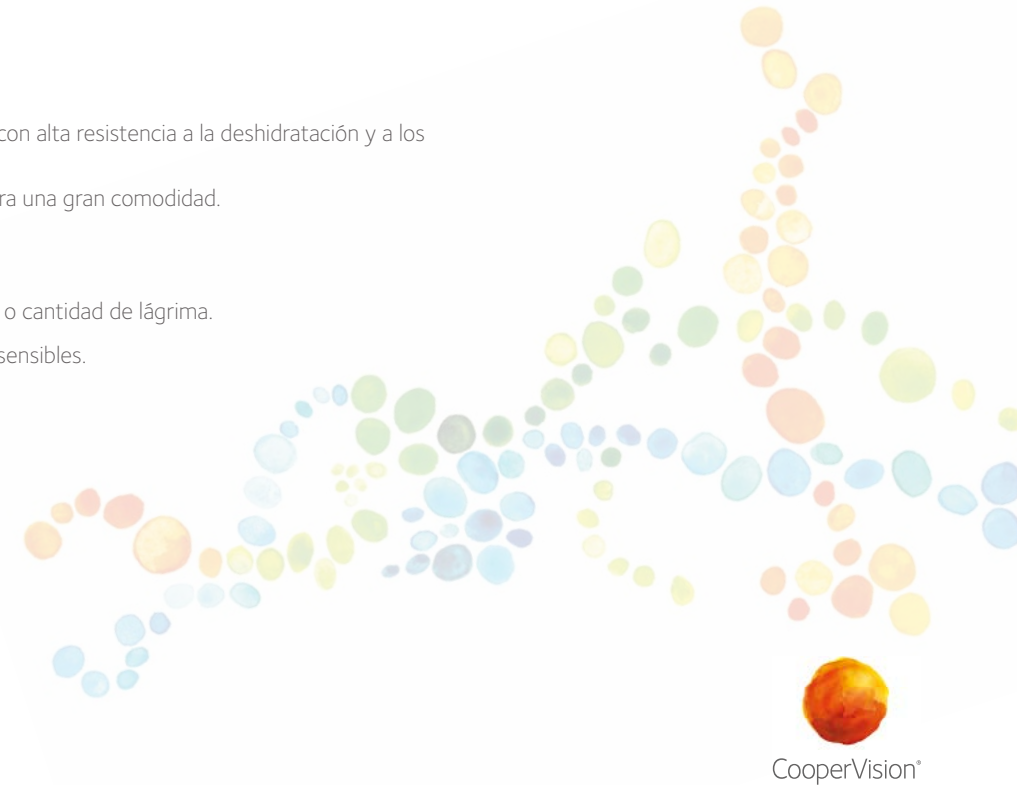

Proclear® toric



Situación de las
Marcas Láser:

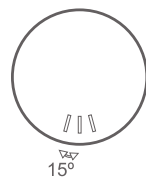

Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y formato de 6 lentes
Presentación de muestra	Blíster unitario
Material	Omafilcon B con PC
Hidratación	62%
Dk	27
Dk/t	25
Espesor centro	0.11 mm Para -3.00 D
Radio	8.80 mm
Diámetro	14.40 mm
Grabado	Stock: 3 marcas a las 6
Mantenimiento	Única / Peróxido
Tinte de manipulación	Azul
Geometría / Estabilización	Toro interno / Prismática

Potencias



Potencias Proclear Tórica Mensual:

En Stock*:

Esferas de +4 a -6 / Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 y -2.25 / Ejes: de 0° a 180° (pasos de 10°)

* Esferas en stock disponibles de +4 a -6

**En los cilindros de -0.75 a -2.25 el paso de los ejes es de 10° independientemente de la esfera que se solicite.



Proclear® toric XR

DISPONIBLES
BLISTERS XR



Categorización



Características


- Lente tórica de material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación y a los depósitos.
- Lente de hidrogel de alta hidratación para una gran comodidad.

Beneficios

- Indicado para usuarios con poca calidad o cantidad de lágrima.
- Adecuada para ambientes secos y ojos sensibles.

Otros profesionales también se interesaron por:

BiofinityToric XR

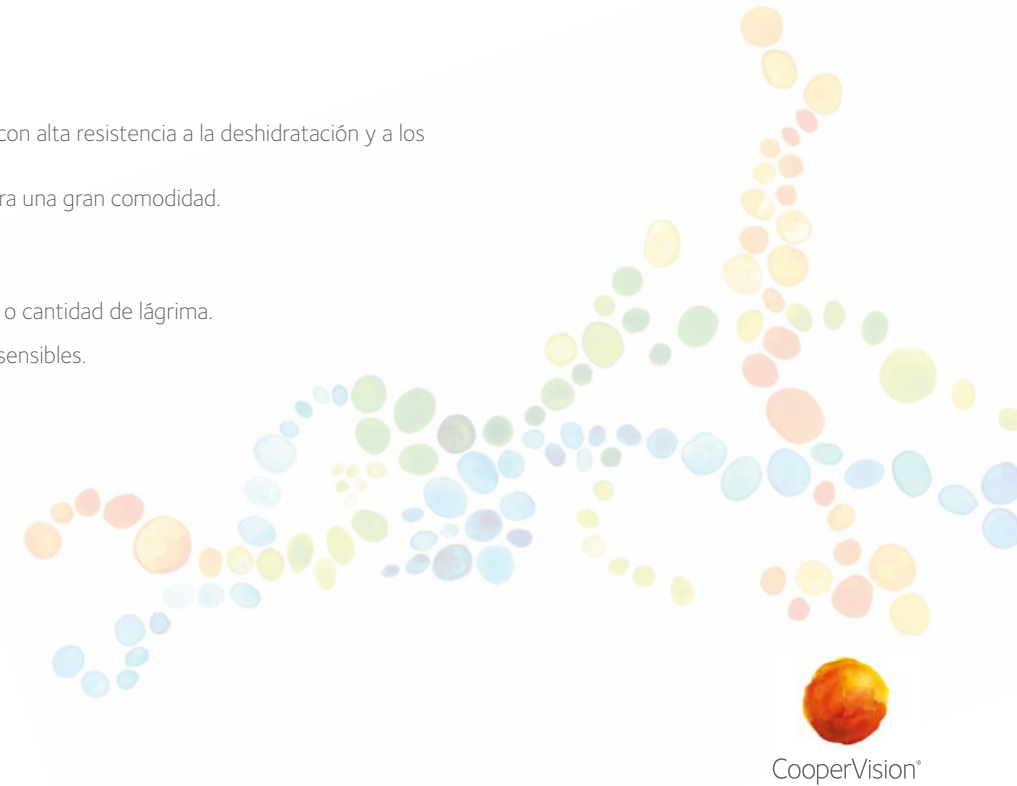


Proclear® toric XR



Situación de las
Marcas Láser:

Versión XR

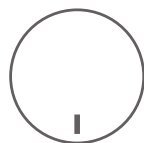


Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Tórica
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Presentación de Venta	8.40 6 lentes; 8.80 3 lentes
Presentación de muestra	Blíster unitario
Material	Omafilcon B con PC
Hidratación	62%
Dk	25
Dk/t	23
Espesor centro	0.11 mm Para -3.00 D
Radio	8.40 y 8.80 mm
Diámetro	14.40 mm
Grabado	Una marca a las 6
Mantenimiento	Única / Peróxido
Tinte de manipulación	Azul
Geometría / Estabilización	Toro interno / Prismática

Potencias

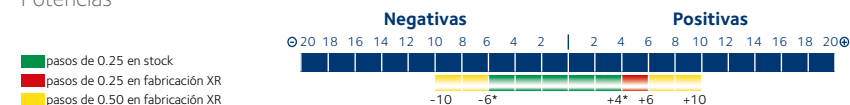

Potencias Proclear Tórica Mensual:

En Stock*:

Esferas de +10 a -10 / Cilindros de -2.75 a -5.75 (pasos de 0.50 D.) / Ejes de 0° a 180° (pasos de 5°)**

* Esferas en stock disponibles de +4 a -6

**En los cilindros de -0.75 a -2.25 el paso de los ejes es de 10° independientemente de la esfera que se solicite.

Proclear® Multifocal y XR

DISPONIBLES
BLISTERS XR



Categorización



Características

- Material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación y a los depósitos.
- Amplia gama de parámetros para llegar a más pacientes.
- Sistema de Geometrías Asimétricas.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Solicite la potencia de lejos del subjetivo realizado, aplicando distometría y equivalente esférico si fuera necesario.

Adición: Solicite la adición del subjetivo realizado, manteniéndola lo más baja posible.

Diseño: Seleccione el diseño de las lentes según el siguiente cuadro:

Adición	Ojo Dominante	Ojo No Dominante
+1.00 + 1.75	D	D
+2.00 + 4.00	D	N

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual.

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Multifocal



Calculadora de Multifocales
Calcule las lentes de prueba en la web
www.CooperVision.es/OptiExpert
o con la App OptiExpert™



ProcLEAR® Multifocal y XR



Categorización



Descripción Técnica

Compensación	Presbicia	
Reemplazo	Mensual	
Uso	Diario	
Geometría*	Geometría Asimétrica. Lente D / Lente N	
Potencias*	+6.00 a -8.00	
Potencias XR*	+20.00 a -20.00	
Adiciones*	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50	
Adiciones XR*	+1.00 a +4.00 pasos de 0.50 D	
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y formato de 6 lentes. XR pack de 3 lentes	
Presentación de muestra	Blíster unitario	
Material	Omafilcon B con PC	
Hidratación	62%	
Dk/t (Corrección borde)	27 / XR: 25	
Espesor centro	0.16 mm	Para -3.00 D
Radio	8.70 mm	
Diámetro	14.40 mm	
Mantenimiento	Única / Peróxido	
Tinte de manipulación	Azul	

Potencias

- pasos de 0.25 en stock
- pasos de 0.50 en stock
- pasos de 0.50 en fabricación XR



** Esferas en stock disponibles de +6 a -8

*Datos necesarios para el pedido



Proclear® Multifocal toric

DISPONIBLES
BLISTERS XR



Categorización



Características

- Material biocompatible con alta resistencia a la deshidratación y a los depósitos.
- Amplia gama de parámetros para llegar a más pacientes.
- Sistema de Geometrías Asimétricas.

Guía de adaptación

PASO 1: Refracción y Dominancia

Realice graduación y verifique el ojo dominante con el test de la Dominancia Sensorial (vídeo en www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASO 2: Selección de las lentes de prueba

Potencia de lejos: Solicite la potencia de lejos del subjetivo realizado, aplicando distometría y equivalente esférico si fuera necesario.

Adición: Solicite la adición del subjetivo realizado, manteniéndola lo más baja posible.

Diseño: Seleccione el diseño de las lentes según el siguiente cuadro:

Adición	Ojo Dominante	Ojo No Dominante
+1.00 + 1.75	D	D
+2.00 + 4.00	D	N

PASO 3: Revisión

Permita al paciente acostumbrarse a las lentes antes de valorar el resultado visual.

Otros profesionales también se interesaron por:

BiofinityToric Multifocal




Proclear® Multifocal toric



Categorización



Situación de las
Marcas Láser:

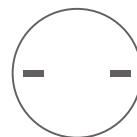


*Datos necesarios
para el pedido

Descripción Técnica

Compensación	Presbicia con Astigmatismo
Reemplazo	Mensual
Uso	Diario
Geometría*	Geometría Asimétrica. Lente D / Lente N
Esferas*	+20.00 a -20.00
Cilindros*	De -0.75 a -5.75 en pasos de 0.50
Ejes*	De 5° a 180° en pasos de 5°
Adiciones*	De +1.00 a +4.00 en pasos de 0.50
Radios*	8.80 / 8.40 mm
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes
Presentación de muestra	Blíster unitario
Material	Omafilcon B con PC
Hidratación	62%
Dk	25
Dk/t	D: 14 / N: 17
Espesor centro	D: 0.18 mm / N: 0.15 mm Para -3.00 D
Diámetro	14.40 mm
Mantenimiento	Única / Peróxido
Tinte de manipulación	Azul
Situación de las marcas láser	Dos marcas 3-9

Potencias

pasos de 0.25
pasos de 0.50

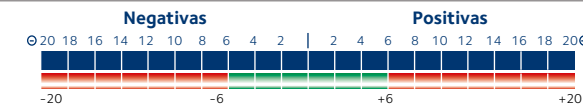

Adiciones: de +1.00 a +4.00 en pasos de 0.50. **Cilindros:** de -0.75 a -5.75 (pasos de 0.50D). **Ejes:** pasos de 5°



Biomedics® 55 Evolution



Categorización



Características

- Lente desechable mensual con diseño Asférico de la cara anterior con tecnología Aberration Neutralising System™.
- Diseño de borde redondeado.

Beneficios

- Buena calidad de visión gracias al diseño de su cara anterior.
- Su borde redondeado proporciona una buena comodidad.
- Filtro protección UV*.

Otros profesionales también se interesaron por:

Biofinity Esferica



Reemplazo mensual

My Vision Max +



Reemplazo mensual

Clariti 1 Day



Reemplazo diario

*Advertencia: las lentes de contacto que absorben radiación UV no son sustitutivas de cualquier otra protección con filtro de absorción de radiación UV como pueden ser gafas de sol, debido a que las lentes de contacto no cubren completamente el ojo y otras áreas oculares adyacentes. Se recomienda que los pacientes sigan usando junto con las lentes de contacto con filtro UV otros elementos de protección con filtros de radiación UV como pueden ser gafas de sol.



CooperVision®

Biomedics® 55 Evolution



Categorización




Descripción Técnica

Compensación	Esférica
Diseño	Asférico
Reemplazo	Mensual
Diseño	Asférico
Uso	Diario
Producción	Moldeada
Presentación de Venta	Pack de 3 lentes y Pack de 6 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratación	55%
Dk/t	27
Espesor centro	0.07 mm Para -3.00 D
Radio	8.60 y 8.90 (negativas) 8.80 (positivas)
Diámetro	14.2 mm
Mantenimiento	Única/Peróxido
Filtro UV	Sí
Tinte de manipulación	Azul

Potencias

■ pasos de 0.25
■ pasos de 0.50

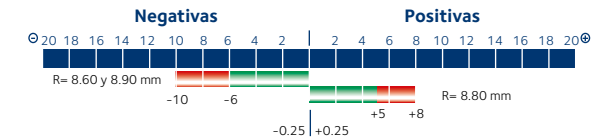

Hy-Care™

Solución única con hialuronato



Descripción Técnica

Composición

- Polihexadina al 0.00013% p/v con hialuronato de sodio

Tiempo mínimo de desinfección

4 horas

Presentación

Envase de 60 ml

Envase de 360 ml

Pedido Mínimo

48 botes de 360 ml

Características

- Solución única de nueva generación
- Superioridad clínica demostrada
- Con lubricante natural y humectante
- Fórmula especial para ojos sensibles
- Multifuncional
- Adecuado para todas las lentes hidrofílicas
- Excepcional eficacia antimicrobiana
- Estuche portalentes antimicrobiano activo con iones de plata.

Beneficios


- Proporciona comodidad debido a la excelente eficacia de la desinfección.
- Solución altamente eficaz para el mantenimiento de lentes de contacto
- La presencia de hialuronato de sodio aumenta la comodidad del usuario de lentes de contacto
- Alto nivel de aceptación por parte de los pacientes
- Elimina la acumulación típica de las proteínas, lípidos y calcio. Eficacia probada contra los patógenos oculares
- Compatibilidad con el mayor número de pacientes
- Eficacia antimicrobiana mejorada, ya que contiene polihexadina
- La eficacia antimicrobiana del estuche ayuda en la prevención de la proliferación de las biopelículas y proporciona seguridad adicional



CooperVision®

Comfort Drops™

Gotas humectantes

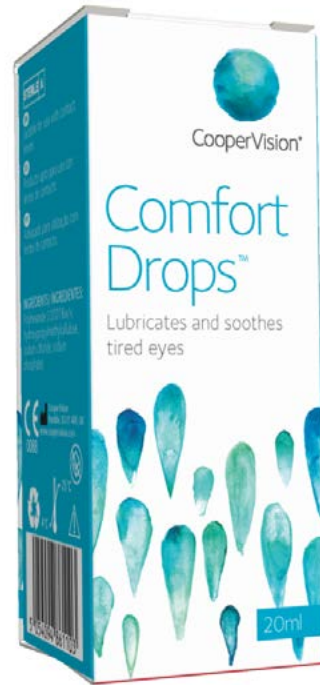

Descripción Técnica

Características

Polihexadina 0.0001%, Edetato sódico 0.05%, fosfato de sodio deshidratado 0.1015%, Dihidrógeno de Sodio; Fosfato hidratado 0.0380%, Poloxamer 188 0.1%, Clorito de sodio 0.875%, Hipromelosa-Methocel 0.175% y agua.

Presentación

Envase de 20 ml

Características

- Gotas humectantes para ojos que se sienten cansados, secos o con incomodidad.
- Formulación equilibrada con el pH natural de las lágrimas.

Beneficios

- Humedece y calma los ojos expuestos a ambientes secos.
- Refresca los ojos y ayuda a restaurar la comodidad.
- Aptas para todo tipo de lentes blandas, según sea necesario durante el día.
- Suaves para el ojo y adecuadas para el uso regular.

Herramientas de captación

Desde CooperVision le ofrecemos la posibilidad de que cada vez que **entregue unas gafas** a su paciente, facilite unas muestras de MyDay o Clariti 1 Day en las originales “carpetas” que CooperVision pone a su disposición.

Para ello, **cada vez que solicite unas lentes oftálmicas** a su laboratorio para el encargo de unas gafas, recuerde solicitar unas muestras de MyDay o Clariti 1 Day a CooperVision de las mismas potencias para hacer una adaptación al paciente.

Esperamos que esta idea **aumente las ventas cruzadas** en su centro y pueda convertir a muchos de sus pacientes en usuarios de gafas y lentes de contacto, aunque sea un uso ocasional de 2 ó 3 días a la semana: para salir, hacer deporte, etc...

Si lo desea puede solicitar “carpetas” para muestras de MyDay y Clariti 1 Day de forma gratuita al teléfono 902 22 55 33 o al e-mail: marketingiberia@coopervision.com

Contacte con su gestor comercial para poder ver los elementos de comunicación en el punto de venta y así incrementar la visibilidad de las lentes de contacto en su óptica.



Herramientas de captación


Campaña de BBDD

La importancia de conectar con tu cliente:

Contacta con tu proveedor de software para poder llegar a tu paciente mediante el envío de SMS o emailings.

Material de comunicación

Contacta con tu gestor comercial, para poder ver los elementos de comunicación en el punto de venta para incrementar la visibilidad de las lentes de contacto en tu óptica.

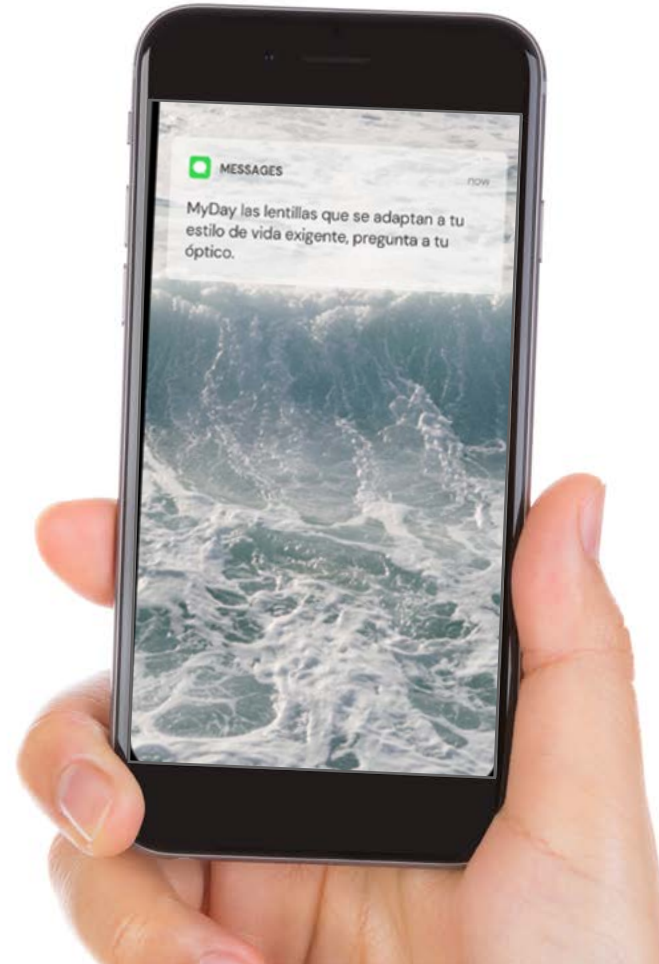

CooperVision®

Herramientas de desarrollo

Formaciones online

Para seguir actualizado día a día en el área de lentes de contacto, no olvide visitar nuestra página web: www.CooperVision.es/Cursos y apuntarse a nuestros cursos.
no olvide visitar nuestra plataforma de formación online: <https://elearning.coopervision.es/es>

OptiExpert™

Una aplicación gratuita esencial para su gabinete con varias funcionalidades:

- Una versión digital de la Escala de Nathan Efron, que le permite:
 - . Hacer una foto del ojo de su paciente o usar las fotos de su lámpara de hendidura para compararlas con las diferentes complicaciones oculares y grados de la Escala de Nathan Efron.
 - . Guardar las fotos y sus condiciones oculares con fecha
 - . Hacer seguimiento de cada caso por fechas
- Una Calculadora de Prescripción de Lentes de contacto para agilizar la selección de las lentes de prueba para sus pacientes
- Mapas de perfiles de oxígeno de diferentes lentes de contacto
- Una Calculadora de Presupuestos para ayudar a sus pacientes a comparar sus opciones en lentes de contacto


Puede descargar la aplicación GRATIS entrando con su móvil en:
www.CooperVision.es/OptiExpert



App Store



Android

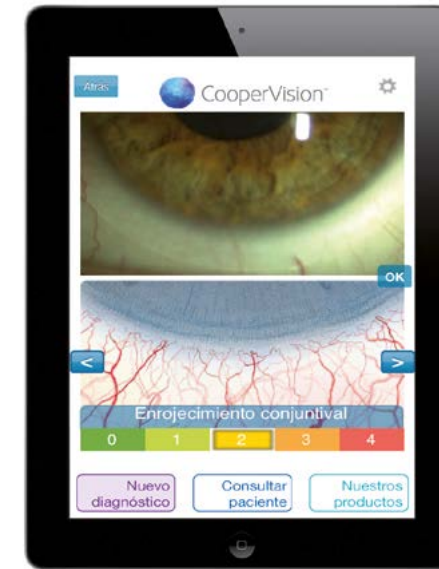

CooperVision®

Herramientas de Fidelización

Envíos a Domicilio



Ponemos a su disposición una nueva manera de acercar las lentes de contacto a sus clientes.

Con el nuevo servicio de Envíos a Domicilio podrá enviar las lentes de contacto al domicilio de sus pacientes directamente desde el almacén de CooperVision.

Puede gestionar el Envío a Domicilio de una manera sencilla, rápida e intuitiva a través de la web de pedidos online de CooperVision siguiendo los pasos a continuación:



1. Acceda con su código de cliente y contraseña habituales a www.CooperVision-online.com



2. Elija los productos que desea solicitar para su paciente y haga clic en "Finalizar pedido"



Indique su correo electrónico y marque la casilla para activar la opción de Envío a Domicilio



3. Rellene todos los datos para recibir su pedido a domicilio. Para finalizar, haga clic en "Enviar pedido"

Para más información consulte www.CooperVision.es/EnvioDomicilio o contacte con el departamento de Atención al cliente en el 902 22 55 33 o en el email clientes@coopervision.es

Servicio Call and Collect

AHORA PUEDES **ENCARGAR Y RECOGER** TUS LENTILLAS O **TE LAS ENVIAMOS A CASA,** DESDE TU ÓPTICA DE SIEMPRE.



CALL AND COLLECT

Nos preocupamos por tu seguridad, por eso tenemos disponible el servicio **Call And Collect**. Llama, reserva tus lentes de contacto y recógelas



ENVÍO A DOMICILIO DE TUS LENTILLAS

Llámanos y te enviamos tus lentillas a tu casa

Juntos en la distancia.

E685



CooperVision®



Sistema de pedidos online

El método más rápido, seguro y eficaz para hacer sus pedidos de lentes a través del software de gestión su centro o desde nuestra web www.CooperVision-Online.com

- Seguimiento de Pedidos.
- Confirmación de pedido vía e-mail.
- Visualización de números de albaranes.

Páginas Temáticas

- www.Sialaslentillas.com
- www.LentillasAntiFatiga.com
- www.LentillasJunior.com
- www.ControldeMiopia.com
- www.LentillasDiarias.com
- www.LentillasProgresivas.com

Puede consultar las condiciones generales de venta en nuestra página www.CooperVision.es/condiciones

70%

de nuestros clientes utilizan
el servicio de pedidos online,
aportándote mayor facilidad a
tu día a día



CooperVision®



CooperVision®
Live Brightly.

